

BacterLab Division



MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN, CHUYÊN CHỖ
BacterTube™ Nước muối sinh lý vô trùng (NS 0,85%)

Dung dịch dùng pha loãng mẫu, pha huyền dịch vi khuẩn dùng cho định danh và kháng sinh đồ.

Code: 08019



I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

BacterTube™ Nước muối sinh lý vô trùng (NS 0,85%) là dung dịch muối đẳng trương dùng pha loãng mẫu, pha huyền dịch vi khuẩn dùng cho định danh và kháng sinh đồ.

II. NGUYÊN TẮC

BacterTube™ Nước muối sinh lý vô trùng (NS 0,85%) với sodium chloride ở nồng độ 0,85% duy trì sự cân bằng thẩm thấu của môi trường nên đảm bảo hình thái và tính toàn vẹn của tế bào. Dung dịch này không ảnh hưởng bất kỳ phản ứng sinh hóa hoặc thử nghiệm tính nhạy cảm của kháng sinh.

III. THÀNH PHẦN

Trong 1 lít môi trường (tham khảo)

Sodium chloride	8,5 g
-----------------	-------

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25⁰C: 5,5 ± 0.2

**Lưu ý: thành phần này mang tính chất tham khảo ngoài ra công ty chúng tôi sẽ pha chế thành phần theo yêu cầu hoặc theo hồ sơ thầu.*

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch muối 0,85% để thực hiện pha loãng các mẫu khác nhau.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

BacterLab kiểm tra chất lượng mỗi lô sản phẩm:

CHỈ TIÊU	ĐIỀU KIỆN Ủ	KẾT QUẢ
Độ vô trùng	35 – 37 ⁰ C trong 24 – 48 giờ	Không nhiễm vi sinh vật

VI. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

- Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
- Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.

VII. QUY TẮC ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 50 ống/ hộp hoặc theo yêu cầu khách hàng.

VIII. HẠN SỬ DỤNG

- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterLab is Brand of LABone Scientific Equipment Co.ltd.

Nhà máy: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vn | Website: www.labone.vn